

Silikonspray

- ☞ physiologisch unbedenklich
- ☞ geruchs- und geschmacksneutral
- ☞ sparsam im Gebrauch

SILIKONSPRAY Zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind. Zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet.

Anwendungshinweise

Die Instrumente nach dem Reinigen und Trocknen öffnen und in mehreren Schichten übereinander in eine Schale legen. Den Sprühstrahl vor allem direkt auf die Gelenke richten. Sprühentfernung 20-30 cm.

Nicht für Instrumente aus Silikonelastomeren verwenden!

Sicherheitshinweise

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur vollständig entleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Zusammensetzung: Dimethylpolysiloxan. Treibgas: Propan-Butan.

EG-Konformitätserklärung

Die genannten Erzeugnisse erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745. Die Produkte sind der Klasse I zugeordnet. Die Konformität der Erzeugnisse mit o.g. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.



WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a
D-57258 Freudenberg

Telefon: 02734/ 2766-0 • Telefax: 02734/ 1659
www.wieds.de • E-mail: info@wieds.de

